

HyBase V8 Classic

Операционный стол

Результат, превосходящий ожидания



Хирургические вмешательства становятся все более сложными, поэтому в современном операционном блоке необходим универсальный операционный стол, который можно мгновенно адаптировать в зависимости от потребностей, обеспечив высочайший уровень предоставления медицинских услуг.

- Максимально допустимая нагрузка в стандартном положении — до 460 кг.
- Во всех положениях допускается общая нагрузка до 250 кг.
- Продольный сдвиг до 350 мм обеспечивает свободный доступ для С-дуги.
- Максимально низкое положение (600 мм от пола) для нейрохирургических операций; максимально высокое положение (1050 мм от пола) для ортопедических операций.
- До 12 электрогидравлических регулировок положений деки стола для точной настройки требуемого положения.
- Беспроводной ручной Bluetooth пульт управления.
- Резервный механогидравлический привод для экстренных ситуаций.
- Трехслойный декомпрессионный матрас для оптимального перераспределения веса пациента.



Адаптируемость в зависимости от выполняемых задач

Отвечает всем потребностям позиционирования пациентов

Модульная конструкция

Модульная столешница обеспечивает возможность адаптации операционного стола для различных типов операций. Конструкция является экономически выгодной: при необходимости выполнения новых типов операций можно докупить новый модуль, а не приобретать дополнительный стол.



Все виды операций



Адаптируемость в зависимости от выполняемых задач

Идеально подходит для эндоскопических операций

Более высокое качество изображения

С развитием малоинвазивной хирургии (MIS) возникает потребность в улучшении качества изображения во время проведения операций. HyBase V8 Classic позволяет получать четкие и высококачественные изображения, которые имеют решающее значение для современной малоинвазивной хирургии (MIS), а также необходимы при проведении торакальных, ортопедических и нейрохирургических операций.

Широкие возможности визуализации



(Опционально) Секция из углеродного волокна обеспечивает максимум пространства для визуализации.

Столешница из углеродного волокна обеспечивает хорошую рентгенопрозрачность. Благодаря большому пространству для доступа C-дуги и высокой рентгенопрозрачности столешницы, HyBase V8 Classic является оптимальным решением для применения в сердечно-сосудистой хирургии.

Двухнаправленный механизм продольного смещения



Продольный сдвиг в сторону головы: 160 мм
Продольный сдвиг в сторону ног: 190 мм

Встроенный подъемник торса



Встроенный подъемник торса (120 мм) для операций на почках.

Столешница из углеродного волокна



Рентгенопрозрачная столешница из углеродного волокна обеспечивает отличную визуализацию.

Оптимальная стабильность

Стол с максимально допустимой нагрузкой до 460 кг в стандартном положении обеспечивает полную безопасность и устойчивость. Во всех положениях допускается общая нагрузка до 250 кг.



Электрический тормоз обеспечивает более высокую устойчивость стола.

Удобный доступ к операционному полю

Оснащенная газовой пружиной, опора для ног HyStirrurp-3 позволяет регулировать разведение ног в стороны в литотомическом положении, снижая давление в подколенной области.



Литотомическое положение с опорой для ног HyStirrurp-3.



Интеллектуальная клавиатура с подсветкой позволяет быстрее идентифицировать активные функциональные клавиши и состояние операционного стола.



Защита IPX5 от водяных струй с любого направления.

Безопасность при различных положениях

Повышенная безопасность пациента

Резервный механогидравлический привод

Резервный механогидравлический привод позволяет изменять положение секций стола и отключать тормоз в случае поломки основного управления или отказа питания/аккумулятора. Резервный привод обеспечивает управление всеми основными электрогидравлическими функциями при помощи ножного насоса и рукоятки выбора функции, расположенной рядом.



Шаг 1: Поворачивая рукоятку, совместите необходимую регулировку со стрелкой.




Шаг 2: Отрегулируйте положение операционного стола при помощи педали ножного насоса.




Многослойный декомпрессионный матрас

Представляем новый декомпрессионный матрас для операционных столов Mindray серии HyBase V. Технология многослойных композитных матрасов полностью учитывает форму тела человека и может применяться у пациентов с ИМТ от 17 до 35. Буферный слой значительно уменьшает контакт между телом и опорным слоем, улучшает характеристики поддержки и дополнительно перераспределяет давление. Особенно это актуально для пациентов с большим весом.

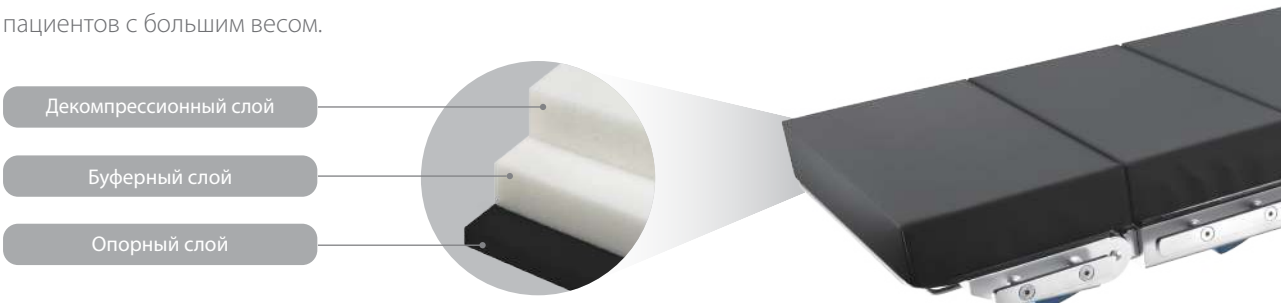

По сравнению с другими современными актуальными продуктами наш матрас обладает более чем 10-процентным оптимизирующим декомпрессионным эффектом, который обеспечивает хорошее распределение давления и снижает риск возникновения пролежней.

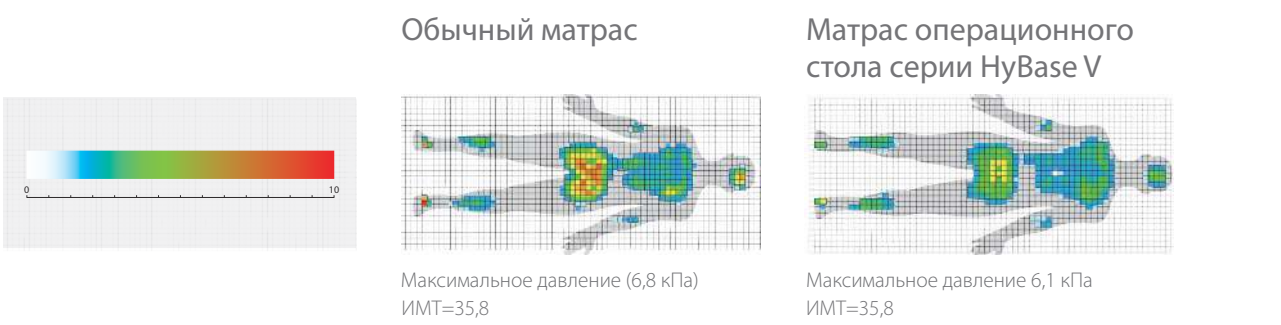

Цветовая индикация


Во время регулировки деки стола на экране отображается цветовая индикация угла наклона или уклона, а так же своевременное предупреждение, если дека достигает крайнего положения Тренделенбурга или обратного Тренделенбурга.



Эффективность в каждой детали

Повышение эффективности в операционной

Интуитивно понятные кнопки с продуманной системой расположения

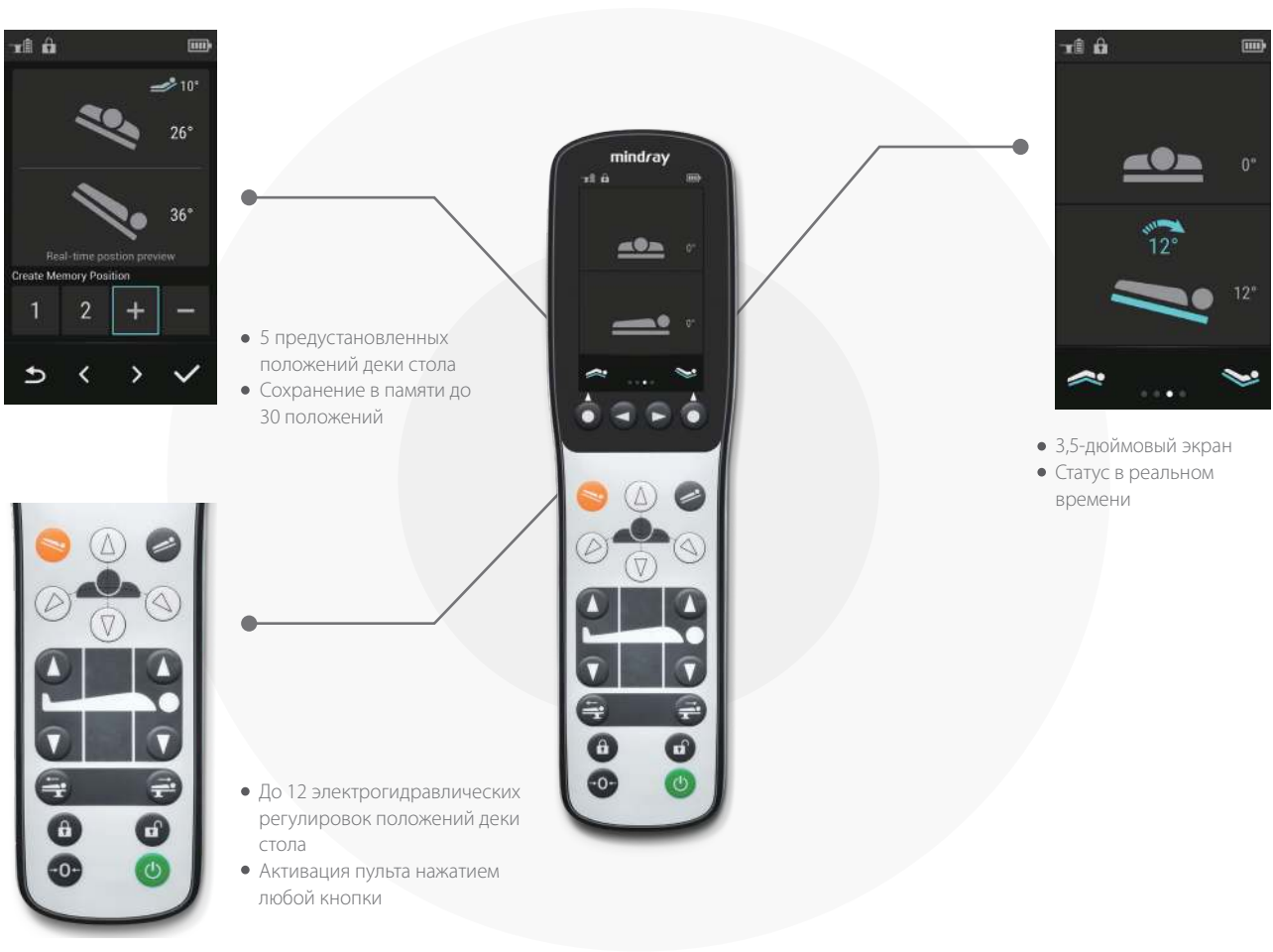

Проводной/ беспроводной пульт управления



Резервная панель управления

Простота регулировки



Облегченная головная секция.



Ножные секции с газовой пружиной.

Простота в использовании



Система быстрой фиксации секций с одной кнопкой.



Четыре вращающихся поворотных колеса облегчают перемещение операционного стола в любом направлении.

Простота в уходе и очистке



Герметичная конструкция.



Плоское основание с кожухом из нержавеющей стали.